

LABÉO

Mérite contagieuse 2024

**Arrêt national du diagnostic par immunofluorescence
à partir du 1er janvier 2024 par décision de la DGAL**

www.laboratoire-labeo.fr

ANALYSE DE MÉTRITE CONTAGIEUSE

(RECHERCHE DE TAYLORELLA EQUIGENITALIS)

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES DIFFÉRENTES TECHNIQUES

	Culture	IF	PCR
Utilisation	Monte France Exportation : <ul style="list-style-type: none"> ◦ animal ◦ semence 	ARRÊT NATIONAL DE L'IMMUNOFLOURESCENCE AU 01/01/2024 - DÉCISION DGAL	Monte France Exportation : <ul style="list-style-type: none"> ◦ animal (UK, IE, DE) ◦ semence (UE)
Milieu de transport de l'écouvillon	Amies charbon		Ecouvillon sec (idéalement) Amies simple ou Amies charbon
Durée d'acheminement autorisée	24 h (transport non réfrigéré) 48h (transport réfrigéré)		7 jours sauf semence UE : 48 h
Rendu de résultats	Minimum 7 jours*		48 heures**
Inconvénients	Risque de résultats « ininterprétables » si flore saprophyte abondante (1 % des cas)		Pas d'antibiogramme possible si résultat positif (pas de souche). Résultat positif à confirmer par culture.

*Pour la culture, le rendu des résultats s'effectue à J+7, à partir de 16h00 (J étant le jour de réception du prélèvement). Les échantillons reçus le samedi matin sont pris en charge, et répondus le lundi à J+9.

**Les analyses PCR reçues le samedi seront répondus le lundi suivant.



MATÉRIEL DE PRÉLÈVEMENT

Disponible gratuitement sur simple demande à accueil-commandes@laboratoire-labeo.fr !

Renouvelez vos écouvillons à chaque saison de monte pour que votre prélèvement soit conforme et le résultat exploitable.



Nos sites accrédités :
LABÉO Frank DUNCOMBE
LABÉO Orne
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



Service technique - 02 31 47 19 41



Albertine LÉON, PhD, HDR
Cheffe du service Microbiologie-Vétérinaire
06 62 57 26 78
albertine.leon@laboratoire-labeo.fr



Camille VERCKEN, Ing. Agro, MSc, chef de centre en reproduction
Chargée de clientèle filière équine
07 64 80 43 11
camille.vercken@laboratoire-labeo.fr



BONNES PRATIQUES



Penser à bien renseigner les **sites de prélèvement et l'identité des chevaux** (nom + N° d'identification), données indispensables pour une transmission SIRE notamment.



Cette année encore, le **typage capsulaire de Klebsiella pneumoniae est réalisé systématiquement et gracieusement** lors de résultat positif en Klebsielle (culture ou PCR), pour vérifier le caractère sexuellement transmissible ou pas de la souche, et vous éviter un traitement inutile.



En cas de demande d'analyse pour **exportation**, merci de préciser « exportation + pays » sur l'ordonnance.



Méthode d'analyse non mentionnée ? La PCR sera alors effectuée par défaut (comme précisé sur le formulaire IFCE).



Certificat BEVA : N'oubliez pas de préciser « certificat BEVA » sur votre demande pour faire reconnaître vos analyses réalisées en France (LABÉO Frank Duncombe uniquement).



Afin de faciliter la **transmission de vos résultats à votre étalonnier** (si vous le connaissez au moment de la réalisation des prélèvements), tout en respectant la confidentialité de vos données, n'oubliez pas de mentionner ses coordonnées.

